

nichtaktivierte Kit

REF 800-0425 (▽100), REF 800-0426 (▽24)

VERWENDUNGSZWECK

Das nichtaktivierte Kit kann entweder als nicht-aktiver Gerinnungstest oder als Allgemaintest mit vom Benutzer gewählten Aktivatoren eingesetzt werden. Es dient zur anwenderspezifischen Hämostase-Überwachung mit dem Sonoclot Analysegerät. Die Küvette des nicht-aktivierten Kits ermöglicht eine Überwachung der Gerinnung anhand von Gewebeativierung, Thrombinaktivierung und anderer anwenderspezifischer Aktivatoren. Zu den Anwendungsgebieten des nicht-aktivierten Tests mit benutzerspezifischen Reagenzien zählen die Überwachung der Fibrinbildung, Fibrinolyse, Hyyperfibrinolyse und Blutgerinnselretraktion.

Zusammen mit dem Sonoclot Analysegerät liefert der nicht-aktivierte Test Werte zur quantitativen Startzeit/ACT und Gerinnungsrate sowie bietet qualitative und quantitative Daten für die Sonoclot Kurve, einschließlich: Fibrinbildung, Thrombozytenfunktion und Hyperfibrinolyse.

ZUSAMMENFASSUNG UND PRINZIPIEN

Die aktivierte Gerinnungszeit ist die Zeit, die verstreicht, bis sich ein Gerinnsel durch Kontaktaktivierung der Gerinnungskaskade bildet.

REAGENZIEN

Jedes nicht-aktivierte Kit für den Gerinnungstest enthält Aktivierungsküvetten aus Kunststoff mit Deckeln, Sonden und diese Gebrauchsanweisung. Die Aktivierungsküvetten enthalten einen Magnetrührstab. Erhältlich sind Verpackungsgrößen mit 100 (#800-0425) und 24 Stück (#800-0426).

LAGERUNG



VORGEHENSWEISE

A. Erforderliches Material:

1. Sonoclot Analysegerät: Modell DP-2951, SC1, SCP1, SCP2 oder SCP4

B. Vorbereitung

1. Überprüfen Sie, ob das Analysegerät eingeschaltet und mit heruntergeklappter Kopfeinheit aufgewärmt wurde. Überprüfen Sie, ob das Analysegerät ordnungsgemäß an das gewünschte Ausgabegerät angeschlossen wurde (siehe Bedienungsanleitung).
2. Klopfen Sie die Küvette mit dem Verschluss nach oben auf eine feste Unterlage, um das Aktivierungspuder von den Seiten und dem Deckel zu lösen.
3. Platzieren Sie die Küvette in einem Steckplatz zur Erwärmung bzw. Aufbewahrung. Modell DP-2951: Vor dem Beginn eines Tests sollte sich die Küvette mindestens 5 Minuten lang im Steckplatz zur Aufbewahrung erwärmen. Modell SC1, SCP1, SCP2 oder SCP4: Vor dem Beginn eines Tests sollte sich die Küvette mindestens 30 Sekunden lang im Küvettenhalter erwärmen. Um die Lagerung zu vereinfachen können die Sonden in die Deckel der Küvetten eingesetzt werden. Es können mehrere Küvetten in den Steckplätzen aufbewahrt werden.

C. Vorbereitung von Küvetten und Sonden

1. Kopfeinheit nach hinten aufklappen.
2. Befestigen Sie die Sonde mit einer leichten Drehbewegung an der Sondenhalterung. Mit dieser Bewegung sollte die Sonde senkrecht auf die Sondenhalterung geschoben werden können. **Die Sondenhalterung darf sich dabei nicht seitlich verschieben.** Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts muss die Sonde fest sitzen.

3. **Belassen Sie die Küvette im Steckplatz** und nehmen Sie den Deckel der Küvette ab, indem Sie diesen mit Daumen und Zeigefinger öffnen. Modell DP-2951: **Der Deckel der Küvette darf nicht abgenommen werden, während diese sich im Küvettenhalter befindet; andernfalls kann die Küvette zerbrechen.** Platzieren Sie anschließend die geöffnete Küvette mit einer leichten Drehbewegung in den Küvettenhalter. Achten Sie auf einen festen Sitz der Küvette.

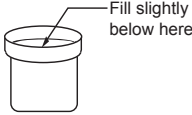
D. Entnahme der Blutprobe

Natives Vollblut muss spätestens innerhalb von 2 Minuten nach der Entnahme analysiert werden. Bitte beachten Sie bei der Blutentnahme die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Entscheiden Sie sorgfältig, an welcher Körperstelle Sie Blut abnehmen möchten. Kontaminationen (aus einem heparinisierten Zugang, einem mit Heparin beschichteten Katheter oder einem zur OP-Vorbereitung gelegten Zugang) führen zu falschen Ergebnissen.
- Nehmen Sie das Blut kontinuierlich, langsam und möglichst atraumatisch ab. Vermeiden Sie dabei übermäßigen Kraftaufwand.
- Verwenden Sie die 2-Spritzen-Technik, wenn die Blutprobenentnahme aus einem Anästhesie- oder Pumpenzugang erfolgt. Die erste Spritze mit 2-3 ml entsorgen. Das Blut der zweiten Spritze als Probe verwenden. Dabei sind UNBEDINGT Kunststoffspritzen zu verwenden, um eine unkontrollierte Kontaktaktivierung durch Glas zu vermeiden.
- Menschliches Blut ist ein biogefährliches Material. Das Bedienungspersonal muss beim Umgang mit Blut und/oder Testküvetten, die Blut enthalten, stets geeignete Schutzausrüstung tragen. Biologisch kontaminiertes Material ist gemäß den geltenden Verfahren des jeweiligen Krankenhauses sowie im Einklang mit allen örtlichen, sowie bundesstaatlichen und nationalen Richtlinien zu behandeln und zu entsorgen.

Für weitere Hinweise zur Handhabung und Testung von Zitratvollblut wenden Sie sich bitte an Sienco Inc.

E. Betrieb des Sonoclot Analysegeräts

1. Geben Sie die Vollblutprobe aus der Spritze in die vorgewärmte Küvette. Benutzen Sie dabei zur sauberen und kontrollierten Übertragung eine stumpfe Kanüle. Füllen Sie die vorgewärmte Küvette mit der Blutprobe, bis die Füllhöhe knapp unterhalb des inneren Küvettenrands liegt. Dies entspricht einem Volumen von ca. 330 bis 360 µl. Drücken Sie sofort auf die START/STOP-Taste. Der Magnetrührer beginnt sich zu drehen.
- 
2. Sobald der Mischvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Piepton und die folgende Anzeige erscheint: „CLOSE HEAD“ (Kopfeinheit schließen). Schließen Sie die Kopfeinheit des Analysegeräts.
 3. Die Probe ist anfangs eine Flüssigkeit. Nach einigen Minuten beginnt die Probe, ein Gerinnsel zu bilden. Das Analysegerät erkennt diese anfängliche Gerinnselbildung, piept und zeigt den Zeitraum an, während dem die Probe flüssig geblieben ist (ACT).
 4. In den nächsten Minuten der Analyse verwandelt sich das Fibrinogen in ein Fibrinogel. Das Analysegerät berechnet die Veränderung im Gerinnungssignal, piept und zeigt den Wert der Gerinnungsrate (Clot Rate; CR) an.
 5. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, drücken Sie auf die START/STOP-Taste. Modell DP-2951: Das Analysegerät stoppt automatisch nach 60 Minuten (Vorgabewert). Modelle SC1, SCP1, SCP2, SCP4: Das Analysegerät stoppt automatisch, sobald alle Ergebnisse berechnet wurden, oder nach 30 Minuten (SC1) bzw. 45 Minuten (SCP1, SCP2, SCP4). Die automatische Abschaltung kann an Ihre jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Eine ausführliche Anleitung finden Sie jeweils in der Bedienungsanleitung.
 6. Öffnen Sie die Kopfeinheit des Analysegeräts und entnehmen Sie die Sonde mit der dafür vorgesehenen Entnahmevorrichtung aus der Sondenhalterung. **Die Sondenhalterung darf sich nicht**

seitlich verschieben. Entsorgen Sie Sonde und Küvette auf ordnungsgemäße Weise. Schließen Sie die Kopfeinheit, um die Temperatur des Geräts konstant zu halten.

F. Qualitätskontrolle

Die ordnungsgemäße Funktionsweise des gbACT+ erfordert folgende regelmäßige Qualitätskontrollen (QC): vor Verwendung einer neuen Lieferung sowie monatliche Kontrollen aus dem aktuellen Bestand. Örtliche sowie bundesstaatliche und nationale Richtlinien könnten häufigere QC-Kontrollen vorschreiben. Unter der Bestellnummer 900-1318 bietet Sienco ein Referenzplasma-QC-Kit an, mit dem die Aktivierung in der Küvette überprüft werden kann. Unter den Bestellnummern 900-1302 (DP-2951), 900-1303 (SC1, SCP1), 900-1323 (SCP2) und 900-1343 (SCP4) bietet Sienco ein QC-Kit mit einem Referenzviskositätsöl an, mit dem die Leistungsfähigkeit des Sonoclot Analysegeräts überprüft werden kann.

REFERENZWERTE

Die Referenzwerte für gesunde Personen sind in der nachfolgenden Tabelle für jedes Gerätemodell aufgelistet.

nichtaktivierte Kit: 800-0410, 800-0416			
Vollblut - Gesunde Person - Kein Heparin			
Parameter	DP-2951 Referenzwerte - Nativblut	SC1, SCP1, SCP2, SCP4 Referenzwerte - Nativblut	SC1, SCP1, SCP2, SCP4 Referenzwerte - Zitratblut
ACT/Beginn	Nicht hergestellt	187- 376 Sekunden	187 - 467 Sekunden
Gerinnungs-RATE	Nicht hergestellt	3 - 10 Gerinnungs-signal Einheiten / Minute	3 - 15 Gerinnungs-signal Einheiten / Minute

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzwerte für gesunde Personen von Referenzwerten bei bestimmten Patientenpopulationen unterscheiden können. Medikamente, Unterschiede bei der Blutentnahme oder bei der Handhabung können je nach Einrichtung zu Unterschieden bei den Referenzwerten führen. Das hämostatische System reagiert auf den Stress eines operativen Eingriffs auf eine Art und Weise, welche die Sonoclot-Ergebnisse beeinflussen kann, typischerweise durch einen beschleunigten Gerinnselabbau. Obwohl es verschiedene Ursachen für Varianzen gibt, können die folgenden Referenzwerte als nützliche Basis dienen. Jede Einrichtung sollte - basierend auf den spezifischen Patientenpopulationen - eigene Referenzwerte festlegen..

VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die Qualität der Testergebnisse hängt von einer korrekten Durchführung ab. Befolgen Sie daher sorgfältig die folgenden Anweisungen.

1. Die Qualität der Testergebnisse hängt von einer korrekten Durchführung ab. Befolgen Sie daher sorgfältig die folgenden Anweisungen.
2. Das Analysegerät darf nur von qualifiziertem Laborpersonal bzw. medizinischem Personal bedient werden.
3. Eine Diagnose sollte nicht nur auf den Sonoclot-Testergebnissen beruhen. Der behandelnde Arzt ist dafür verantwortlich, die Testergebnisse des Analysegeräts vor dem Hintergrund des spezifischen Krankheitsbilds des Patienten, anderer Testergebnisse und klinischer Beobachtungen zu interpretieren.
4. Vorsicht beim Umgang mit den Materialien:
 - Vermeiden Sie bei der Entnahme von Blutproben eine Heparinkontamination durch den Katheter.
 - Verwenden Sie niemals die erste Probe, die aus einem neu angelegten Zugang entnommen wurde, um eine Kontaminierung der Probe mit Gewebethromboplastin zu vermeiden.
 - Blut, Verschmutzungen und Fremdkörper von der Sondenhalterung fernhalten, um eine Kontaminierung des

elektromechanischen Messwertgebers zu vermeiden.


- Verwenden Sie Sonden und Küvetten auf keinen Fall mehrmals, um eine Thrombinkontamination auszuschließen.
4. Wenn das Analysegerät nicht richtig temperiert ist (in der Regel 37 °C), erscheint eine Fehlermeldung und der Test wird nicht durchgeführt.
 5. Wärmen Sie für gleichmäßige Ergebnisse die Küvetten vor dem Einsatz auf. Belassen Sie die Küvetten niemals für längere Zeit (z. B. über Nacht) im Steckplatz zur Erwärmung, um einen Zerfall der Probe durch verlängerte Wärmeeinwirkung zu vermeiden.
 6. Nehmen Sie vor dem Abstellen von Küvetten im Küvettenhalter jeweils die Küvettenkappe ab. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Messwertgebers kommen.
 7. Die Küvetten müssen fest in der vorgesehenen Halterung sitzen, um den Bewegungsablauf der Sonde und des Rührstabs nicht zu beeinträchtigen.
 8. Die Küvette nicht überfüllen Die richtige Füllhöhe liegt knapp unterhalb des inneren Küvettenrands.
 9. Das Einsetzen und Entfernen der Sonde muss immer vertikal über der Sondenhalterung erfolgen. Die Befestigungsvorrichtung darf niemals horizontal bewegt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Sonde fest sitzt und den Bewegungsablauf des Rührstabs nicht stört.
 10. Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktionsweise des Analysegeräts und der Aktivierungsküvetten durch Qualitätskontrollen.
 11. Bei der Entsorgung von Sonden und Küvetten sind die Sicherheitsrichtlinien zu beachten.
 12. In seltenen Fällen können mechanische Störungen zu falschen Ergebnissen führen. Prüfen Sie stets die Ergebnisse auf Einheitlichkeit.
 13. Extrem visköse Blutproben (Eintauchergebnis > 25 Gerinnungssignaleinheiten auf der Geräteanzeige) können eventuell Schichten bilden. Verwenden Sie in solchen Fällen ein Zusatzgerät, um die Blutprobe zu mischen, bevor sie in die Küvette gegeben wird.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Typische CVs: ACT/Beginn - 6 %, Gerinnungs-RATE - 5 %. Der CV für den Beginn sollte 10 % nicht überschreiten (wenn eine Probe auf mehreren Sonoclot Analysegeräten getestet wird). Der CV für die Gerinnungsrate kann leicht erhöht sein, da deren Parameter stärker durch das Verfahren beeinflusst werden. Aufgrund der Alterungseffekte einer Probe wird das mehrfache Testen einer Probe auf einem Sonoclot Analysegerät nicht zur Bestimmung des CVs empfohlen.

LITERATUR

Bedienungsanleitung des Sonoclot Analysegeräts

 SIENCO, INC 7985 Vance Dr., Ste 104 Arvada, CO 80003
USA 303-420-1148 1-800-432-1624 Fax 303-379-4403
www.sienco.com e-mail: sienco@sienco.com

 QNET BV Hommerterweg 286
6436 AM Amsternrade The Netherlands